

AUFTRAGSBOGEN UND TEST COVID-19

Eine Video-Anleitung zum Testkonzept kann hier gefunden werden oder über den QR-Code rechts: <http://laax.com/safemountain>



1 Personalien (bitte in Druckbuchstaben ausfüllen / zwingende Angaben)

2 Einwilligung in die Befundübermittlung

3 Datum, Uhrzeit der Probenentnahme eintragen



1 Personalien in das vorgesehene Feld vollständig und in Druckbuchstaben eintragen.

2 Einwilligung in die Befundübermittlung
Einwilligung zur Datenschutzerklärung

3 Datum, Uhrzeit der Probenentnahme eintragen
Unterschrift nicht vergessen!

! Auftragsbogen an einer Abgabestelle vorzeigen und für die Auftragserteilung digital erfassen lassen. Ihnen werden dort **3 Barcodes** generiert:

4 Oberer Barcode ("Barcode für Testschein") auf den Auftragsbogen kleben.
Mittlerer Barcode als Nachweis für den Test
5 Unterer Barcode ("Nase-/Rachenabstrich") auf das Probenröhrchen kleben.

6 Kochsalzlösung für den Speichel-Gurgelwassertest



TESTDURCHFÜHRUNG (nüchtern, direkt nach dem Aufstehen!)

- Mit geschlossenem Mund **2x husten**.
- Deckel der Kochsalzlösung abdrehen, vollständig im Mund leeren und für **ca. 30 Sekunden gurgeln/spülen**.
- Flüssigkeit in das Probenröhrchen spucken und gut verschliessen.



7 Probenröhrchen in den Safetybag legen und diesen gut verschliessen - dafür einfach die Klebefolie abziehen.

! DAS WEISSE VLIES MUSS IM SAFETYBAG BLEIBEN!



8 Safetybag in einen Couvert legen und gut verschliessen.

Couvert UND Auftragsbogen morgens (bis 9 Uhr) zur Verkaufsstelle zurückbringen.