

AUFTRAGSBOGEN UND TEST COVID-19

Eine Video-Anleitung zum Testkonzept kann hier gefunden werden
oder ÜBER den QR-Code rechts: <http://laax.com/safemounfain>



- 1 Füllen Sie Ihre persönlichen Angaben in Blockschrift in die vorgegebenen Felder. Name, Adresse, Telefonnummer, E-Mail-Adresse, Geburtstag, Geschlecht
- 2 Kreuzen Sie die Einwilligung zur Befundübermittlung an
Kreuzen Sie die Einwilligung zur Datenschutzerklärung an
- 3 Tragen Sie Datum und Uhrzeit der Probenentnahme ein
Vergessen Sie Ihre Unterschrift nicht



- 4 Einen Barcode längs auf das weisse Feld des Probengefässes kleben.
- 5 Einen weiteren Barcode oben links im Feld "Barcode" hochkant auf den Auftragsbogen kleben.
- 6 Kochsalzlösung für den Speichel-Gurgelwassertest



TESTDURCHFÜHRUNG (nüchtern, direkt nach dem Aufstehen!)

- Mit geschlossenem Mund 2x husten.
- Deckel der Kochsalzlösung abdrehen, vollständig im Mund leeren und für ca. 30 Sekunden gurgeln/spülen.
- Flüssigkeit in das Probenröhrchen spucken und gut verschliessen.



- 7 Probengefäss in den Safetybag legen und diesen gut verschliessen - dafür einfach die Klebefolie abziehen.

! DAS WEISSE VLIES MUSS IM SAFETYBAG BLEIBEN!




- 8 Bringen Sie Safetybag UND Auftragsbogen vor 09:00 Uhr morgens zur Verkaufsstelle zurück.

! AUFTRAGSBOGEN NICHT FALTEN!

! OHNE AUFTRAGSBOGEN KEIN ERGEBNIS!

ONLINE-LOGIN FÜR FRAGEBOGEN UND RESULTATEINSICHT

PERSÖNLICHE REGISTRIERUNG - muss vor der Testabgabe erfolgen
Jede Testperson muss sich individuell mit einer eigenen E-Mail-Adresse registrieren!

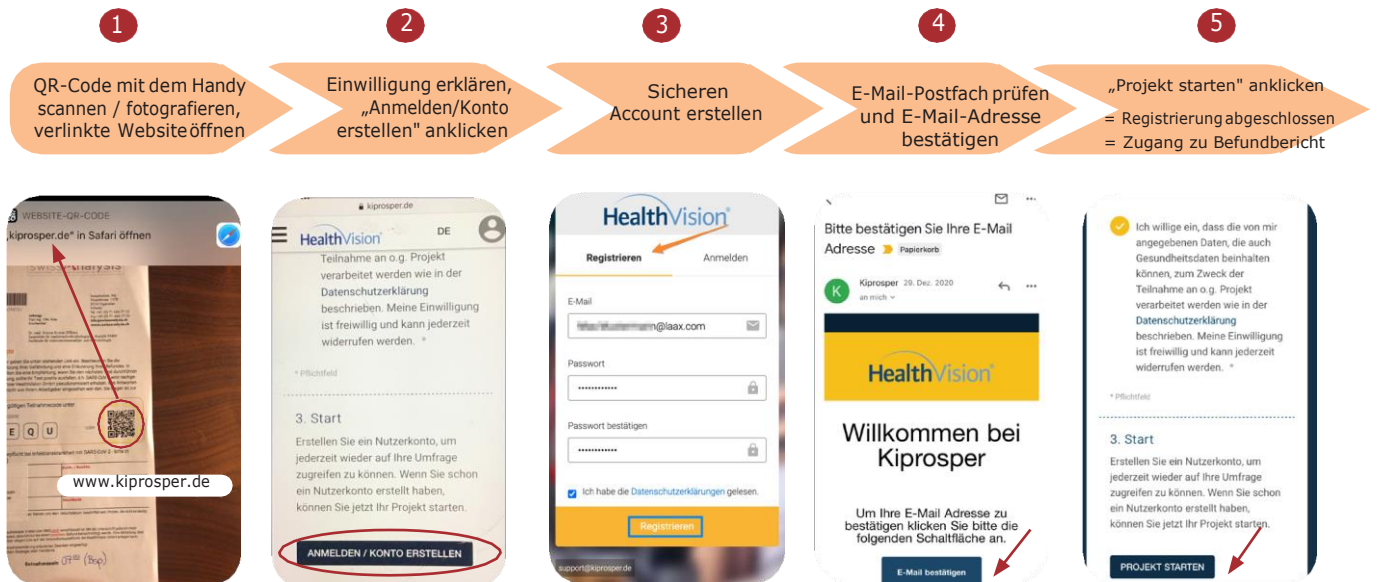

Eine verspätete Registrierung kann dazu führen, dass das Testresultat nicht eingesehen werden kann!
Die Registrierung muss daher vor Testabgabe erfolgen.
Für jeden Test braucht es eine individuelle Registrierung mit einer eigenen E-Mail-Adresse.
DIESE BEFUNDART IST NICHT FÜR REISEN UND GRENZÜBERTRITTE GEEIGNET!

LOGIN

